

starVision

Instrukcja obsługi FlipUp



starVision Adidas® TourPro 3.0 Up



starMed GbR
Am Schammacher Feld 19
85567 Grafing b. München
call +49 (0) 8092 - 850 447
international@starmed-technik.de
www.starmed-technik.de

Zawartość opakowania

- 1 lupy starVision
- 1 pasek mocujący
- 1 woreczek czyszczący
- 1 wkrętak typu Torx i klucz imbusowy
- 1 futerał
- 1 instrukcja obsługi

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- > Należy zwracać uwagę na bezpieczne dopasowanie lup.
- > Nie należy bezpośrednio patrzeć w lupach na słońce ani na inne źródła jasnego światła (np. laser), ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia oczu.
- > Nieprawidłowe postępowanie z lupami, takie jak poddawanie mocnym obciążeniom mechanicznym (np. upuszczenie lub nacisk), może prowadzić do ich uszkodzenia.

Przeznaczenie

Lupy starMed są przeznaczone wyłącznie do stosowania w celu uzyskania powiększenia podczas pracy, zabiegów chirurgicznych i badania.

Lupy FlipUp

Lupy starVision FlipUp to lupy dwuokularowe uniwersalnego użytku do indywidualnego dostosowania, pozwalające na widzenie trójwymiarowe w małej odległości.

Dostosowanie

Dla jak najlepszej widoczności konieczne jest idealne dostosowanie lup FlipUp.

> Założyć lupy i zabezpieczyć je, używając paska mocującego, który zapobiega ich ześlizgnięciu się.

> Dostosować pozycję w pionie i nachylenie układu, używając załączonego wkrętaka typu torx.

> Popatrzeć na dobrze oświetlony przedmiot, znajdujący się w odległości roboczej, i dostosować elementy optyczne, tak aby móc widzieć obiekt na środku pola widzenia obojgiem oczu.

> System można dostosować do różnej pozycji oczu (w pionie i w poziomie).

Dostosowanie jest prawidłowe, kiedy uzyskamy okrągłe i wolne od cieni pole korekty.

Odległość robocza


Odległość robocza jest z góry określona przez układ optyczny lup i nie może być zmodyfikowana.

Nakładka korekcyjna

Osoby z wadą wzroku mogą stosować lupy w połączeniu z nakładką korekcyjną. Można również dołożyć ją później.

Zakładanie lup

Założyć lupy oburącz. Należy używać paska mocującego, przyczepionego do zauszników okularów, który zapobiega ześlizgnięciu się lup i gwarantuje ich doskonałe zamocowanie. Dopasować pasek mocujący, pociągając za jego koniec i jednocześnie naciskając przycisk zabezpieczający.

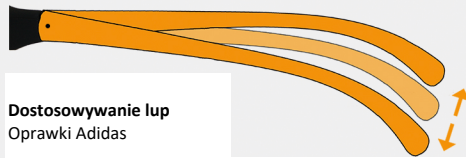

Dostosowywanie lup

Oprawki Adidas

Dla uzyskania doskonałego ustawienia i pozycji lup można dostosować zauszniki, wybierając jedno z trzech ustawień (zob. rysunek powyżej).



Noski można ustawić w jednej z dwóch pozycji (z wyjątkiem nakładek korekcyjnych Adizero/Adivista i Tourpro).

Oprawka STMS/ Ti22

Zauszniki i noski można dostosowywać poprzez ich doginanie. Powinien zrobić to specjalista lub optyk.

Zakładanie lup.

Poluzować pasek mocujący, naciskając przycisk zabezpieczający i pociągając go w stronę końca. Zdjąć lupy oburącz, prostym ruchem zdejmując je z głowy. Dzięki temu szkła i oprawki nie zostaną poddane naprężeniom.

Przechowywanie

Kiedy lupy nie są używane, należy przechowywać je w załączonym futerałku. Należy zwracać uwagę na to, aby podczas zamykania futerału nie naciskać elementów optycznych.

Czyszczenie/ Pielęgnacja

Lupy nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Lupy można czyścić wilgotną ściereczką nie pozostawiającą włókien. Nie należy stosować rozpuszczalników, agresywnych środków czyszczących ani alkoholu.

Dezynfekcja

Lupy można dezynfekować standardowymi płynami do dezynfekcji bez alkoholu, używając ściereczki.

Czyszczenie ultradźwiękowe

Układ optyczny lup nie jest wodoszczelny i nie może być czyszczony pod wodą.

Sterylizacja

Nie ma możliwości sterylizacji lup ani ich części.